

Well-Prep

EDTA Cream til rodkanal præparation
- Rengøring af rodkanalen.



Beskrivelse

Well-Prep inklusive ethyldiamintetraeddikesyre (EDTA) er et chelateringsmiddel, der muliggør effektiv rengøring og lettere forberedelse af rodkanalen. Når urinstofperoxid i Well-Prep reagerer med natriumhypochlorit, løftes papiraffaldsrester ud af kanalen ved boblende effekt. Well-Prep forbedrer den tubulære indtrængning af endodontiske medikamenter og fyldmaterialer, når dentinale tubuli åbnes.

Well-Prep forbedrer også effektiviteten ved injektion i rodkanalerne ved at inkludere et specielt smøremiddel.

Sammensætning

- Ethyldiamintetraeddikesyre (EDTA) 15%
- Urea Peroxide 10%
- PPG og PEG

Indikationer

1. Let formning og rensning af rodkanalen.
2. Nem og hurtig fjernelse af debris.
3. Hjælper med afkalkning af dentin.
4. Enkel håndtering af instrumenter i kanalerne på grund af smørende effekt.

Anbefalet procedure

1. Isolér tanden med en kofferdam og lav en oplukning.
2. I Injicér rigeligt Well-Prep i rodkanalen, eller placer Well-Prep direkte på filen.
3. rens kanalen på almindelig vis.
4. Hvis nødvendigt gentages ovenstående trin.
5. Rens rodkanalen med sodium hypochlorite.


Opbevaring

1. Opbevares i køleskab for at opretholde ydeevnen.
2. Må ikke nedfrys.
3. Undgå direkte sollys.

Forholdsregler

1. Kun til dental brug.
2. Bør kun anvendes af tandlæger. Overhold procedure og forholdsregler.
3. Opbevares udenfor rækkevidde for andre end dentale sundhedspersonaler, herunder børn og ældre.
4. Undgå ekstrudering af Well-Prep ud af apex.
5. Påfør forsigtigt for at undgå at gøre skade på rodkanalen.
6. Luk altid hæppen helt til og opbevar ved stuetemperatur.
7. Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker.
8. Ved utilsigtet kontakt med øjne eller oralt væv skylles øjeblikkeligt med rigeligt vand.
9. Anvend ikke efter udløbsdato.
10. Brug ikke dette produkt til patienter med kendte allergier overfor produktets indholdsstoffer.

Symboler

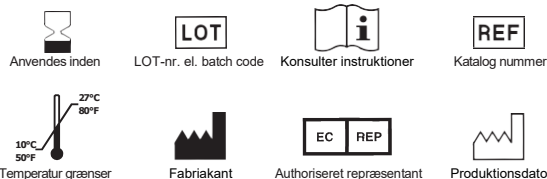

Garanti

VERICOM CO.,LTD VERICOM CO., LTD erstatter et produkt, der viser sig at være defekt. VERICOM CO., LTD. påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til dets tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed.

Udstedelsesdato 2020.03.30. IFUEN01E(Rev.7)-SJY