

Well-Root ST

Materiale til forsegling af rodkanaler



Instruktioner



▪ **Kun egnet til dental brug**



VERICOM CO., LTD.

Dental Materials

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea
vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com
www.vericom.co.kr

Copyright ©VERICOM. All right reserved.

Da

Beskrivelse

Well-Root ST er en praktisk forblandet, klar til brug, injicerbar calciumaluminium-silicatpasta udviklet til permanent obturation af rodkanalen. Well-Root ST er baseret på en sammensætning af calciumaluminium-silicatforbindelse, som kræver tilstedeværelse af vand for at hærdne og sætte sig. Well-Root ST krymper ikke under hærdning og demonstrerer fremragende fysiske egenskaber.

Hærdetid

Hærdetiden er 25 min. målt i henhold til ISO6876: 2012 (100% fugtighed). I normale rodkanaler kan indstillingstiden dog være mere end 2,5 timer.

Sammensætning


- Calciumaluminium-silicatforbindelse
- Zirkoniumoxid
- Fyldstof og fortykningsmiddel

Indikationer

Permanent obturation af rodkanalen.

Anbefalet procedure

1. Prep og skyl rodkanalen ved hjælp af endodontiske standard teknikker.
2. For at gøre arbejdet nemmere fastgøres en fri vinkelholder til sprøjten som vist på billedet.

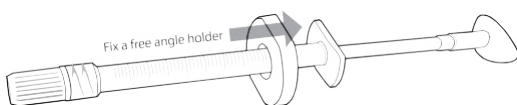

3. Fjern sprøjtehætten fra Well-Root ST-sprøjten. Fastgør en engangsspids med drejning med uret til sprøjten. Engangsspidsen er fleksibel og kan bøjes for at lette adgangen til rodkanalen.
4. Indsæt spidsen af sprøjten i rodkanalen ikke dybere end den koronale tredjedel (1/3). Dispensér forsigtigt og jævnt Well-Root ST ind i toppen af rodkanalen. Der kan tages et røntgenbillede på dette stadium for at sikre en tilstrækkelig apikal forsegling. Hvis placeringen ikke er tilstrækkelig, skal Well-Root ST skylles grundigt ud af rodkanalen og proceduren gentages.
5. Fortsæt med at fylde rodkanalen med Well-Root ST, mens engangsspidsen trækkes tilbage. Fyld rodkanalen helt; undgå dannelse af luftbobler og overfyldning af rodkanalen.
6. Fjern overskydende Well-Root ST fra toppen af rodkanalen med en fugtig bomulds-pellet.
7. Anbring guttapercha-point i rodkanalen ved hjælp af endodontiske standardteknikker.

Opbevaring

1. Sørg for at sprøjtehætten er skruet helt på, når du ikke anvender Well-Root ST.
2. Må ikke udsættes for direkte sollys.
3. Opbevares køligt.

Forholdsregler

1. Kun til dental brug.
2. Bør kun anvendes af tandlæger. Overhold procedure og forholdsregler.
3. Opbevares uden for rækkevidde for andre end dentale sundhedspersoner, herunder børn og ældre.
4. Tryk ikke på pastaen med for stor kraft, da patienten kan have nogle akutte smerter.
5. Fyld ikke over apex.
6. Ved utilsigtet kontakt med øjnene skylles øjeblikkeligt med rigeligt vand.
7. Genbrug ikke engangsspidsen efter brug.
8. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
9. Brug ikke som indvortes medicin.

Symboler



Anvendes inden



LOT-nr. el. batch code



Konsulter instruktioner



Katalog nummer



Temperatur grænser



Fabrikanter



Authoriseret repræsentant
i EU



Produktionsdato

Garanti

VERICOM CO., LTD erstatter et produkt, der viser sig at være defekt. VERICOM CO., LTD. påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til dets tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed.