

BC Plus-adhæsiv

Enkelt komponent adhæsiv



Beskrivelse

BC Plus er et enkeltkomponent adhæsiv, designet til at binde komposit til dentin, emalje, støbte metaller, behandlet porcelæn og amalgam. BC Plus er en ethanolbaseret resin adhæsiv. For anvendelsen af BC Plus skal tanden smøres med en etch. Brugen af etch er afgørende for både emalje- og dentinoverflader.

Komponenter

- Bis-GMA
- Dimethacrylat
- Tilsætningsstoffer
- Methacryloyl syre
- Ethanol


Indikationer

1. Binding af direkte komposit
2. Binding til komposit og amalgam
3. Binding af indirekte restaureringer - porcelæn, komposit (Inlays, Onlays, facader, kroner)
4. Forsegling af overfølsomhedsområder på tænder

Kontra-indikationer

BC Plus bør ikke anvendes på patienter, der har haft overfølsomhed over for methacrylatmonomer.

Applicering

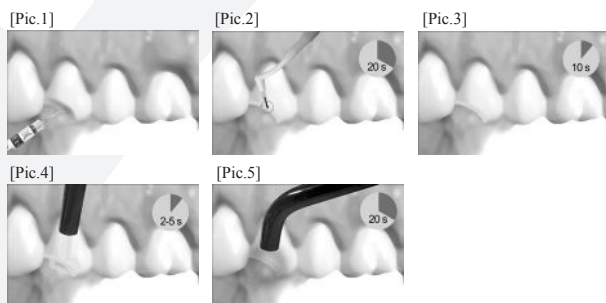

Instruktioner til direkte binding af komposit til tandstruktur

1. Rengør og klargør tanden. Af hensyn til beskyttelse af Pulpa, anbefales det at der anbringes en lille mængde calciumhydroxid cement efterfulgt af påføring af glasionomer.
2. Æts emalje og dentin med en etch i 15 sekunder. Efter påføring af etch skylles der grundigt med vand. Hvis tanden er for tør, kan der opstå en dårlig bindingsstyrke samt følsomhed.
3. Dispenser 2 dråber BC Plus i blandeskålen. Kom adhæsiven på børstespiden og påfør 2 lag adhæsiv på tandoverfladen i 20 sekunder. [Billede.2]
4. Vent i 10 sekunder efter påføring af BC Plus adhæsiv. [Billede.3]
5. Spred forsigtigt BC Plus adhæsiv med en mild luftstrøm i 2 ~ 5 sekunder [Billede.4]. Hvis overfladen ikke er blank, skal du påføre yderligere et lag og lade det tørre.
6. Lyshærd BC Plus adhæsiv i 20 sekunder med en standard lyshærdningsenhed [Billede.5]. (Hvis outputet af lyshærdningsenheden er under 400 mW / cm2 målt ved hjælp af et radiometer, kan det være nødvendigt med øget hærde tid.)
7. Anbring kompositten trinvis i hulrummet og afslut i overensstemmelse med producentens anvisninger om materialet.

Instruktioner til limning til komposit og sæt amalgam

1. Kofferdam er den foretrukne isoleringsmetode.
2. Rug overfladen efter fra eksisterende amalgam eller komposit kan fjernes ved hjælp af enten et bor, en diamant eller med sandblæsnings teknik.
3. Æts emalje og dentin med etch i 15 sekunder. Skyl derefter grundigt med vand, fjern evt. overskydende vand fra overfladen med en vatpelt. Hvis tanden er for tør, kan der forekomme dårlig bindingsstyrke og følsomhed.
4. Doser 2 dråber BC Plus adhæsiv i blandingskålen. Kom adhæsiv på børstespiden og påfør 2 lag adhæsiv på overfladen i 20 sekunder.
5. Vent i 10 sekunder efter påføring af BC Plus adhæsiv.
6. Spred forsigtigt BC Plus adhæsiv med en mild luftstrøm i 2 ~ 5 sekunder [Billede.4]. Hvis overfladen ikke er blank, skal du påføre yderligere et lag og lade det tørre.
7. Lyshærd BC Plus adhæsiv i 20 sekunder med en standard lyshærdningsenhed [Billede.5]. (Hvis outputet af lyshærdningsenheden er under 400 mW / cm2 målt ved hjælp af et radiometer, kan det være nødvendigt med øget hærde tid.)
8. Ved tilfælde af amalgam tilhæftning påføres adhæsiv med et tynd lag (0,25 ~ 0,5 mm) på overfladen med en børste. Lyshærdning af hvert lag i 20 sekunder.
9. I tilfælde af opbygning, følg producenten anvisninger for dette.

Instruktioner til cementering af porcelæn og indirekte kompositrestaurering

1. Fjern midlertidig restaurering. Forbered og rengør tanden. Prøv restaureringen for pasform, farve osv.
2. Æts emalje og dentin med en etch i 15 sekunder. Efter æts, skyl med vand, overskydende vand fra overfladen kan fjernes med en vatpelt. Hvis tanden er for tør, kan der opstå dårlig bindingsstyrke og følsomhed.
3. Dispenser 2 dråber BC Plus adhæsiv i blandingskålen. Mæt børstespiden grundigt med adhæsiv og påfør 2 lag adhæsiv på overfladen i 20 sekunder.
4. Vent i 10 sekunder efter påføring af BC Plus adhæsiv.
5. Spred forsigtigt BC Plus adhæsiv med en mild luftstrøm i 2 ~ 5 sekunder. Hvis overfladen ikke er blank, skal du påføre yderligere et lag og tørre.
6. Lyshærdning BC Plus adhæsiv i 20 sekunder med en standard lyshærdningsenhed. (Hvis lyshærdningsenhedens output er under 400mW / cm2, målt ved hjælp af et radiometer, kan det være nødvendigt med øget hærde tid.)
7. Påfør silan på indersiden af restaureringen. Tørlæg. (Til sammensat restaurering er påføring af silan valgfri.)
8. Børst på 1. lag BC Plus adhæsiv i stedet for den påførte silan.
9. Fjern opløsningsmidlet fra BC Plus adhæsiv med en luftstråle. Let hærde tid er ikke nødvendig.
10. Bland og påfør korrekt skygge af dobbelthærdende eller lethærdende cement på indersiden af restaureringen. Overskydende cement fjernes let, når cement hærdes delvist (ca. 2 ~ 3 sekunder).

Instruktioner til desinficering af rodoverfladen

1. Rengør rodoverfladen let med pimpsten. Skyl og tør.
2. Ætsning af dentin med ætsemiddel i 15 sekunder. Efter æts, skyl grundigt med vand, overskydende vand fra overfladen kan fjernes med en vatpelt. Hvis tanden er for tør, kan der opstå dårlig bindingsstyrke og følsomhed.
3. Dispenser 2 dråber BC Plus adhæsiv i blandingskålen. Mæt børstespiden grundigt og påfør 2 lag adhæsiv på overfladen i 20 sekunder.
4. Vent i 10 sekunder efter påføring af BC Plus adhæsiv.
5. Spred forsigtigt BC Plus adhæsiv med en mild luftstrøm for at fordampe opløsningsmidlet i 2 ~ 5 sekunder.
6. Lyshærdning af BC Plus adhæsiv i 20 sekunder med en standard lyshærdningsenhed. (Hvis lyshærdningsenhedens output er under 400mW / Cm2, målt ved hjælp af et radiometer, kan det være nødvendigt med øget hærde tid.)
7. Påfør 2 ekstra lag adhæsiv på overfladen i 20 sekunder.
8. Vent på i 10 sekunder efter påføring af BC Plus adhæsiv.
9. Spred forsigtigt BC Plus adhæsiv med en mild luftstrøm for at fordampe opløsningsmidlet i 2 ~ 5 sekunder.
10. Lyshærd BC Plus adhæsiv i 20 sekunder med en standard lyshærdningsenhed. (Hvis lyshærdningsenhedens output er under 400 mW / cm2, målt ved hjælp af et radiometer, kan det være nødvendigt at øge hærde tiden.)


Opbevaring

1. Opbevar ikke ved forhøjet temperatur eller intenst lys.
2. Opbevar BC Plus i køleskab for at opretholde ydeevnen, når du ikke bruger BC Plus.
3. Opbevar ikke materiale i nærheden af eugenolholdige produkter.
4. For at minimere fordampningen af adhæsiv skal flasken tildækkes omgående efter brug.

Forholdsregler

1. Kun til tandbrug
2. Skal anvendes af en tandlæge. Overhold proceduren og forholdsreglerne.
3. Opbevares væk fra ikke-tandlæger, herunder børn, ældre og andre.
4. Eksponering for uuhærdet resin bør undgås. Ved kontakt med huden skylles straks med rigeligt sæbe og vand.
5. Ved utilsigtet kontakt med øjnene eller ved langvarig kontakt med oralt væv skylles straks med en stor mængde vand. Søg lægehjælp.
6. Brug af beskyttelseshandsker anbefales.
7. Ved opbevaring i køleskabet skal BC Plus nå stuetemperatur inden brug.
8. Indånd ikke dampen. Indånding kan forårsage sensibilisering.
9. Følg producentens anvisninger om håndtering, korrekt brug og anbefalinger til øjenbeskyttelse, når du bruger et hærtningslys.
10. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Symbols

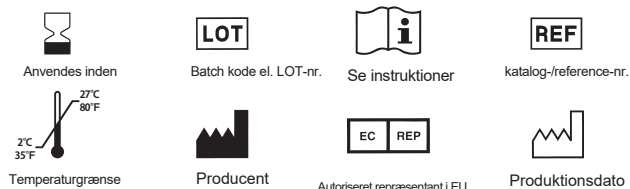

Garanti

VERICOM CO., LTD. erstatter produkt, der har vist sig at være defekt. VERICOM CO., LTD. påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens ansvar at bestemme produktets egnethed til dets tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed.