

roeko


Endo-Frost

-50 °C ❄️

200 ml	270	3	e
--------	-----	---	---

Kältespray
Cold spray
Spray de refroidissement
Spray refrigerante
Spray refrigerante
Spray refrescante
Koudespray
Kølespray
Kylspray
Kuldespray
Kylmäspray
Ψυκτικό σπρέι
Spray de răcire
Spray chłodzący
Hladilno razpršilo
Šaldymo aerosolis
Külmasprei
Mrazící spray
Fagyasztópermet
Studený sprej
Замрозявач спрей
Aukstuma aerosols
Soğutucu sprej

REF 240 000

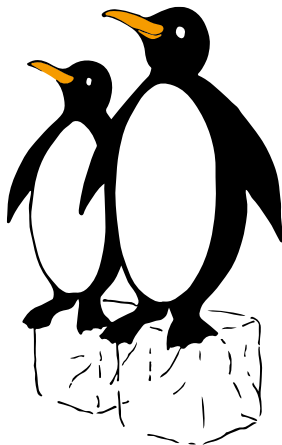

Zusammensetzung: Propan/Butan

Ingredients: Propane/Butane

Composition : Propane/Butane

Composizione: Propano/butano

Composició: Propano/butano

Composição: Propano/butano

Samenstelling: propan/butaan

Ingredienser: Propan/Butan

Innehåll: Propan/butan

Sammensetning: Propan/butan

Ainesosat: Propaani/Butaani

Σύνθεση: Προπάνιο/Βουτάνιο

Compoziție: propan/butan

Skład: Propan/Butan

Sestava: Propan/butan

Sudėtis: propanas ir butanas

Koostisodad: Propan/butaan

Složení: propan/butan

Összetétel: Propán/Bután

Zloženie: Propán/bután

Състав: пропан/бутан

Sastāvdaļas: Propāns/butāns

Bileşimi: propan/bütan

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Raiffeisenstraße 30

89129 Langenau/Germany

Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway

Cuyahoga Falls, OH 44223/USA

www.coltene.com

CE

 **COLTENE**

Kølespray

DA

Endo-Frost er en kølespray ned til -50 °C.

Endo-Frost er særligt velegnet til frysning af pellets eller små vatruller. Til direkte sprøjtning af genstanden sættes forlængerrøret på ventilen.

- Fare

- Yderst brandfarlig aerosol.
- Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
- Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
- Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
- Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
- Opbevares utilgængeligt for børn.

Sprøjt aldrig i munden!