

Classic

Operationskittel

Str. XL/one size*Blå m. bindebånd, velcro og overlappende ryg*

Godkendt efter standard EN 13795, ISO 11607

Standard ydeevne, AAMI niveau 2

Materiale: 45 g SMS

Advarsel: Må ikke anvendes, hvis pakningen har været åbnet eller på anden måde beskadiget. Risiko for kontaminering og infektion ved genanvendelse ved brug hos forskellige patienter. (Rev. 22/10/2020)

Brugsanvisning

1. Den sterile kittel bør åbnes i et område uden risiko for kontaminering.
2. Stik begge hænder ind i armhullerne. Hold kitlen på afstand af kroppen og lad den folde sig helt ud. Lad begge hænder glide ind i ærmehullerne og ærmerne, hold hænderne på skulderniveau og på afstand af kroppen.
3. Ved åben handskepåtagnig, trækkes manchetten hen til tommelfingerniveau. Ved lukket handskepåtagnig, skubbes hænderne frem til manchetkanten. Den assisterende person bør trække kitlen op over skulderne, ide han/hun kun berører indersiden af kitlen.
4. Arranger velcrolukningen i nakken, tag handsker på og bind kitlens bånd.

**Anhui MedPurest Medical Technology Co., Ltd.**

Jio Bao Industrial park 246000 Anqing, Anhui Province, Kina

**Prolinx GmbH**

Brehmstr. 56, 40239 Düsseldorf, Tyskland

**Dentorium ApS**

Gunnekær 16, 2610 Rødovre, Danmark