

DenFil Flow



Lyshærdende radiapakt flydende komposit resin

Beskrivelse

DenFil Flow er en lyshærdende, radiapakt flydende resin til resaureringer.

Sammensætning

- Bis-GMA / TEGDMA / UDMA / Barium glas / Silica
- Indholdet af uorganisk fyldstof (partikel str. 0.01~2.5 µm) er ca. 60% målt på vægt.

Indikationer

- Klasse V restaureringer (cervical caries, rod erosion, kileformede defekter)
- Anterior restaureringer (klasse III, IV)
- Små posterior restaureringer
- Udvidet fissurforsøgning i molarer og premolarer
- Reparation af komposit/keramiske facader

Kontraindikationer

DenFil Flow bør ikke anvendes til patienter, som udvikler overfølsomhed overfor methacrylate monomer.

Anbefalet procedure

- 1. Valg af farvenuance**
Rens tanden med pimpsten og vand for at fjerne plak og pletter på overfladen. Inden tanden isoleres, vælges passende farve.
- 2. Preparation af kaviteten**
Fjern al amalgam eller andre base materialer som interfererer med behandlingen.
- 3. Beskyttelse af pulpa**
Ved dybe kaviteter skal dentinen dækkes tæt på pulpa med en lille mængde calcium hydroxid liner, hvilket efterlader resten af kavitets overflade fri til binding. Glas-ionomer eller andre eugenol-fri materialer kan anvendes, hvis ønsket.
- 4. Behandling af emalje og dentin**
Følg producentens instruktioner vedr. etch, priming, påføring af adhæsiv og hærdning.
- 5. Påføring**
Fjern hættens og sæt engangsspids på sprøjten. Sørg for at spidsens nål ikke er tilstoppet, inden du påfører resin. Hvis nålen er tilstoppet fjernes spidsen og en smule resin trykkes ud direkte fra sprøjten. Hvis der er synlige tilstopninger, fjernes de fra sprøjten. Påsæt en ny engangsspids og tryk lidt resin ud. DenFil Flow kan ekstruderes på en dispenserbeholder og påføres med en børste eller andre instrumenter.
- 6. Placering**
Påfør resin i intervaller på 2.0 mm niveauer el. mindre. Træk sprøjtestemplet tilbage efter hver påførsel for at undgå at resin flyder ud.

7. Hærdning

Eksponeer hvert område af restaureringsoverfladen for en synlig lyskilde med høj intensitet. Hold lysstyrespidsen så tæt på det restaurerede område som muligt under eksponering. Lyshærd i 20 sek. med en standard lyshærdningsenhed. (Hvis lyshærdningsenhedens output er under 400 mW/cm², målt ved hjælp af et hærdradiometer, kan det være nødvendigt med mere tid.)

8. Finishing

Finisher og poler ved hjælp af konventionelle teknikker.


Opbevaring

1. Må ikke opbevares ved forhøjede temperaturer og intenst lys.
2. Opbevares køligt.
3. Må ikke opbevares i nærheden af eugenolholdigt materiale.
4. Sæt hættens på øjeblikkeligt efter brug.

Forholdsregler

1. Kun til dental brug.
2. Må kun anvendes af tandlægefagligt sundhedspersonale.
3. Opbevares væk fra andre end tandlægefagligt sundhedspersonale.
4. Stop øjeblikkeligt brugen af resin, hvis der opstår allergi overfor acrylat.
5. Undgå udsættelse for uhardet resin. Hvis resin kommer i kontakt med huden, vaskes straks med vand og sæbe.
6. Hvis der sker utilsigtet kontakt med øjnene eller langvarig kontakt med oralt væv, skylles straks med rigelig mængde vand.
7. Brug af beskyttelseshandsker og teknikker uden berøring anbefales.
8. Det anbefales kraftigt at benytte beskyttelsesudstyr til luftvejene.
9. Hvis produktet opbevares på køl, skal det have lov at nå stuetemperatur inden brug.
10. I tilfælde af ikke-polymerisering kontrolleres lysintensiteten på lyshærdningsenheden og derefter kontakte den nærmeste forhandler eller producenten.
11. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen.

Symboler

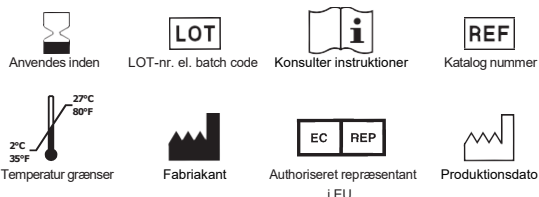

Garanti

VERICOM CO., LTD erstatter et produkt, der viser sig at være defekt. VERICOM CO., LTD. påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens ansvar at vurdere produktets egnethed til dets tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed.