


Instruktioner

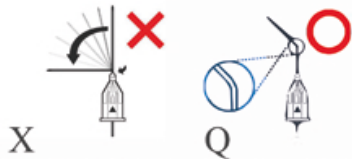

X Bøj ikke nålen på det punkt, hvor den er forbundet til plastikholderen.

Q Bøj kun en gang på midten af nålen, omkr. 45° (bøj aldrig 90°).



Anvend ikke, hvis forseglingen er brudt.

Bruges direkte efter åbning af unit x:al og lad nålen være dækket, indtil den skal bruges.

Opbevar ikke ved ekstreme temperaturer, fugtighed og undgå direkte sollys.

- Bryd den hermetiske forsegling (skru hættten for at åbne - bøj eller knæk ikke).
- Indsæt først sprøjten i patronen med bedøvelse og derefter sættes nålen på.
- Nålen bør blive i den beskyttende hætte, indtil den skal bruges.
- Brug den beskyttende hætte til at fjerne nålen.

1.) Skru hættten for at åbne



2.) Sæt nålen på sprøjten



3.) Fjern hættten



VERICOM CO., LTD.

861-8, Toegye-Dong, Chuncheon-Si, Gangwon-Do 200-944, Korea

<http://www.vericom.co.kr> Tel. +82-31-441-2881 Fax. +82-31-441-2883



European Representative (Koo Kyo-Chan)

3 Rue Fostiers 92340 Bourg la Reine France Tel. +33-1-4973-7900 Fax. +33-1-7402-5600