

U-Bond

CE
1639

En-komponent selv-ætsende lyshærdende adhæsiv

Beskrivelse

U-Bond er en en-komponent selvætsende lyshærdet adhæsiv, designet til at binde komposit til dentin og emalje.

Komposition

- Acetone
- Fumed Silica
- 4-META
- Vand
- UDMA
- Tilsætningsstoffer

Indikationer

Binding af direkte komposit til tandstrukturer

Anbefalet procedure

1. Isolér tanden der skal præpereres
2. Rens og præperer kaviteten. Hvis det er tæt på pulpa påføres en minimal mængde calciumhydroxidcement.
3. Gennemblød børstespids med U-Bond. Påfør et lag adhæsiv ved at gnide overfladen i 20 sekunder. Hvis der er binding til usleben emalje, påfør fosforsyre, skyl med vand og tør.
4. Spred U-Bond ud ved blæsning med højt tryk i 2-5 sekunder, for at fjerne opløsningsmidlet. Hvis overfladen ikke er blank, påfør yderligere lag og tørlæg.
5. Lyshærd U-Bond i 10 sekunder. Hvis kaviteten er dyb anbefales lyshærdning i 20 sekunder.
6. I tilfælde af styrkende påføring, lyshærd og håndter det styrkende materiale ifølge producentens procedurer.

Opbevaring


1. Opbevar Ikke i forhøjede temperature eller intenst
2. Opbevares i køleskabet.
3. Opbevares ikke tæt ved materiale som indeholder eugenol.
4. Efter brug af U-Bond, bør proppen straks sættes på igen, for at minimere fordampning.

Forholdsregler

1. Kun til tandbrug.
2. Det bør anvendes af en tandlæge. Overhold procedure og forholdsreglerne.
3. Undgå at komme i kontakt med øjne og hud

4. Opbevar den uden for rækkevidde for ikke-tandfaglige personer, herunder børn, ældre og andre.
5. Brug ikke på patienter der har hudsensibilitet eller allergiske reaktioner af U-Bond.
6. Før brug af U-Bond der har været opbevaret i køleskabet, lad det nå rumtemperatur.
7. U-Bond bør bruges indenfor 5 minutter efter dosering fra flasken.
8. I tilfælde af ikke-polymerisation skal du kontrollere lysstyrken på lyshærdningsenheden og derefter kontakte den nærmeste forhandler(e) eller producent direkte vedrørende de samme kvalitetssager.
9. Brug ikke sammen med materialer der indeholder eugenol.
10. Brug ikke efter udløbsdato.
11. Vær forsigtig med ikke-hærdet adhæsiv materiale. Hvis adhæsiven får kontakt med huden vaskes straks med sæbe og vand.
12. Brug af beskyttelseshandsker anbefales.
13. Ved utilsigtet kontakt med øjne eller langvarig kontakt med oralt væv, skylles straks med store mængder vand og søg medicinske råd.

Symboler

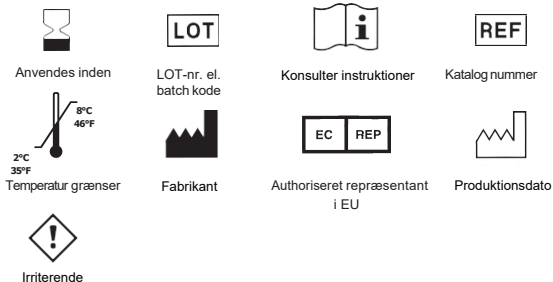

Garanti

VERICOM CO., LTD erstatter produkt, der har vist sig at være defekt. VERICOM CO., LTD. Påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, direkte eller følgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens ansvar at bestemme produktets egnethed til dets tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed.



VERICOM CO., LTD.

www.vericom.co.kr



48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea
Tel : +82-31-441-2881 Fax : +82-31-441-2883
E-mail vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com

European Representative (Koo Kyo-Chan) 3
Rue Rosiers 92340 Bourg la Reine France
E-mail kdescartes@vericom.co.kr

VERICOM USA, INC.
22541 Aspan St. Suite A Lake Forest, CA 92630 USA
Tel : +1-949-317-3011 Fax : +1-949-317-301