

# Vonflex S Bite



## Vinyl Polysiloxane Bid Registrerings Materiale

### Beskrivelse

Vonflex S Bite, som den yderligere polymeriserings silicone bid registrering, rekonstruerer patientens unikke okklusion på bideplade ved registrering mellem øvre og nedre tænder.

### Sammensætning

- Vinyl siloxane
- Dampet silica
- Silica
- Hydrogen siloxane
- Organo platinum complex
- Pigmenter

### Teknisk Information

	Hurtig hærdning g	Normal hærdning
Arbejds tid(23°C, sek.)	30	45
Minimum tid til at fjerne fra munden (sek.)	30	45
Hårdhed (Shore A)	88±2	88±2

### Kontraindikationer

Vonflex S Bite bør ikke bruges til patienter der udvikler hudsensibilisering og allergi eller har en historie med udslæt eller dermatitis fra silikone.

### Indikationer

- Standard bid registrering af det normale sammenbid
- Afbillede af antagonist
- Coating af bidepunkter
- Hovedmateriale til nålepunkts registrering.
- Produktion af små model segmenter

### Advarsler

1. Hvis materialet får kontakt til øjne, skyld med store mængder vand i flere minutter. Hvis der opstår symptomer, kontakt en læge.
2. Må ikke inhaleres, sluges eller indtages. Hvis sundhedsproblemer opstår efter slugning af materialet, kontakt straks en læge. I få tilfælde kan der opstå blokering i tarmene. Kontakt straks en læge hvis produktet inhaleres.
3. Efterlad ikke rester af materiale i sulcus eller den orale kavitet.
4. Vonflex S Bite bør ikke bruges til konventionelle aftryk da dets endelige hårdhed gør det meget svært at fjerne fra munden. Kan resultere i uønsket ekstraktion.
5. Overfølsomme personer kan opleve allergiske reaktioner til produktet.

### Anbefalet procedure

1. Før man tager Vonflex S Bite renses alle forureninger i den orale kavitet ved at skylde og tørre.
2. Placer Vonflex S Bite patronne i doseringspistolen.
3. Dose ren lille mængde aftryks materiale før påsætning af blandingsspiden, for at sikre ens flow fra begge sider af patronen.
4. Pres fast for at tilhæfte blandingsspidsen til patronen. Derefter roteres den farvede krave på blandingsspidsen ¼ omgang med uret til enden af patronen.

5. Pres håndtaget flere gange for at få materialet ud på okklusalfladen af tænderne. Instruer patienten til centreret okklusion for at registrere bid.
6. Efter materialet er hærdet, fjernes det fra munden. Hvis der er overskud af materiale, fjernes det efter.
7. Vær opmærksom på bid registrationen og klar model.


### Opbevaring

1. Opbevar et køligt sted (2~24°C).
2. Luk låget hurtigt og tæt efter brug.
3. Undgå kontakt med luft.

### Forholdsregler

1. Vonflex S Bite skal bruges af en faglig person og skal opbevares uden for rækkevidde for ikke-tandfaglige personer, herunder børn, ældre og andre.
2. Brug ikke beskadigede produkter.
3. Blandingsspidser er kun til engangsbrug. Efter brug, lad blandingsspidsen sidde på patronen for at holde den lukket.
4. I tilfælde af at kondensations polymeriserings silikoner, polysulfide aftryks materialer, eugenol-holdige materialer, latex handsker, fugt og glycerol, kosmetik, nyligt indsatte komposit fyldninger osv. kommer i kontakt med Vonflex S Bite, kan de muligvis sænke polymeriseringen eller danne en ru overflade på Vonflex S Bite.
5. I tilfælde af brug af bedøvelsesmidler (Lidocaine osv.) I form af spray eller pulver, er der en stor risiko for at forsinke hærdningen og ru overflade.
6. Pas på at ikke-hærdet materiale ikke kommer på tøjet. Det er svært at fjerne når det hærdet på tøjet.
7. Brug ikke Vonflex S Bite efter det er udløbet.
8. Hvis materialet opbevares i køleskab, skal det nå stuetemperatur før brug. Opbevaringstemperaturen for brug kan føre til længere eller kortere arbejdstid. I tilfælde af fald eller øgning i temperatur på 1°C, kan arbejdstiden forkortes eller forlænges med 15 sekunder.
9. Vonflex S Bite bør bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen.

### Symboler

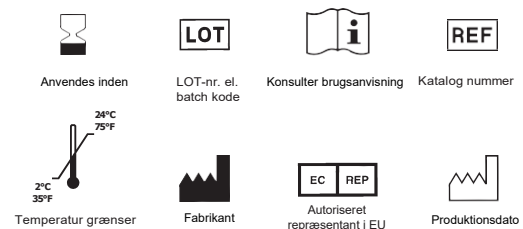

### Garanti

VERICOM CO., LTD erstatter produkt, der har vist sig at være defekt. VERICOM CO., LTD. Påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, direkte eller folgeskader, der stammer fra brugen af eller manglende evne til at bruge det beskrevne produkt. Før brug er det brugerens ansvar at bestemme produktets egnethed til dets tilsligtede anvendelse. Brugeren påtager sig al risiko og ansvar i forbindelse hermed.

Udstedelsesdato 2020.05.25. IFU08-8E(Rev.7)-KYZ